

Hinweise zu Probenentnahme und Versand

Vor der Probenentnahme

Unser Entnahmeset enthält 5 sterile Papierspitzen zur Entnahme subgingivaler Plaqueproben. Bei der Bestimmung können Sie zwischen einer **Poolprobe** – die Probenentnahme erfolgt aus mehreren Zahnfleischtaschen und die verwendeten Spitzen werden in **einem** Tütchen gepoolt – oder der **Einzeluntersuchung** pro Zahnfleischtasche wählen. Hier erfolgt die Probenentnahme an bis zu 4 Stellen, die Papierspitzen werden in **separate** Tütchen gegeben und einzeln analysiert. Die Abrechnung erfolgt pro Analyse, d.h. pro eingesendetem Tütchen.

Bitte versehen Sie das umseitige Auftragsformular mit den Patientendaten, dem Datum der Probenentnahme, Ihrer Praxisadresse und der klinischen Diagnose. Wünschen Sie den Befund vorab per E-mail, geben Sie bitte **immer** die **E-Mail Adresse** an.

Vergessen Sie bitte nicht, den Patienten die Verpflichtungserklärung **unterschreiben** zu lassen. Er stimmt damit der Weitergabe seiner Daten an unser Labor zu und bestätigt, dass er über die Kosten der Analyse informiert wurde.

Durchführung

Bitte entfernen Sie vor der Probenentnahme die supragingivale Plaque mittels einer sterilen Kürette und legen Sie den Entnahmestort durch sterile Wattetampons trocken. **Vermeiden Sie bitte eine Probenentnahme aus akut blutenden Taschen** (Testbeeinflussung). Führen Sie mittels einer sterilen Pinzette je eine Papierspitze pro Entnahmestelle bis zum Sulcusgrund ein und belassen diese dort für 10 – 15 Sekunden. Geben Sie die Papierspitzen in das/die entsprechend gekennzeichnete(n) Tütchen und vermerken Sie die Entnahmestelle auf dem Auftragsformular.

Kontrolle nach Behandlung

Bitte beachten Sie, dass eine Kontrolle des Behandlungserfolgs frühestens nach 8 Wochen durchgeführt werden sollte, um ein aussagekräftiges Ergebnis zu erhalten!

Haben Sie noch Fragen?

Dann wenden Sie sich direkt an uns:

Telefon +49 345 / 5559 741

E-Mail: info@biosolutions-halle.de

Bitte senden Sie die Probe(n) ausschließlich in dem dafür vorgesehenen Tütchen an unser Labor.

Tipp: Der Aufkleber auf dem Tütchen kann als Adressaufkleber für Ihre Rücksendung an uns verwendet werden!

BioSolutions Halle GmbH, Weinbergweg 22, 06120 Halle /Saale